

OPTEGO スティックオンプリズムのお手入れ

洗う

●基本

メガネからプリズムを取り外す必要はありません

プリズムを温水で洗い流してください

必要に応じて、中性洗剤を使用することもできます

●頑固な汚れのとき

メガネからプリズムを取り外す必要はありませんが、必要に応じてメガネからプリズムを取り外してください

プリズムのギザギザ面を外側にしてやさしく曲げて、溝の汚れを洗いながしてください
ごびりついた汚れは、アイシャドウブラシなどのやわらかいブラシを使って、やさしくなでて汚れを落としてください

★注意★

メガネからプリズムを取り外した場合、再度メガネに貼り付ける時に「貼る場所や方向」などにご注意ください

ふき取る

糸くずの出ないメガネ拭きやキッチンペーパーなどで、
力を加えないで水滴を吸い取らせる感覚でふき取ってください

★注意★

力を加えてふき取ると、プリズムを押し伸ばしてしまい、ゆがみの原因となります
ゆがんでしまっても完全に乾燥されれば元にもどります

お困りの際は

メガネからプリズムを取り外して、再度メガネに貼り付けようとしたら・・・

- ・左右どちらのレンズに貼るのか分からなくなってしまった
- ・どの方向に貼るのか分からなくなってしまった

など、ご不明な点がございましたら、眼科やメガネ店へお問い合わせしてください